


ペーパーホルダーおだけアタッチメントタイプ (PR-1A) 施工説明書

商品の機能が十分に発揮されるよう、本説明書の内容に沿って正しく施工してください。





①安全上の注意

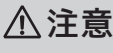


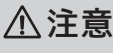

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この説明書では、商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

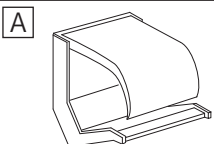
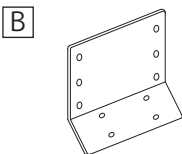
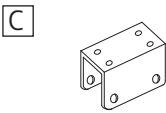
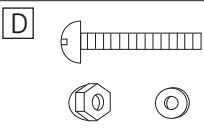
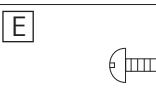
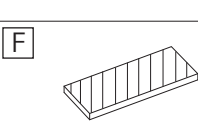
表示	意味
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

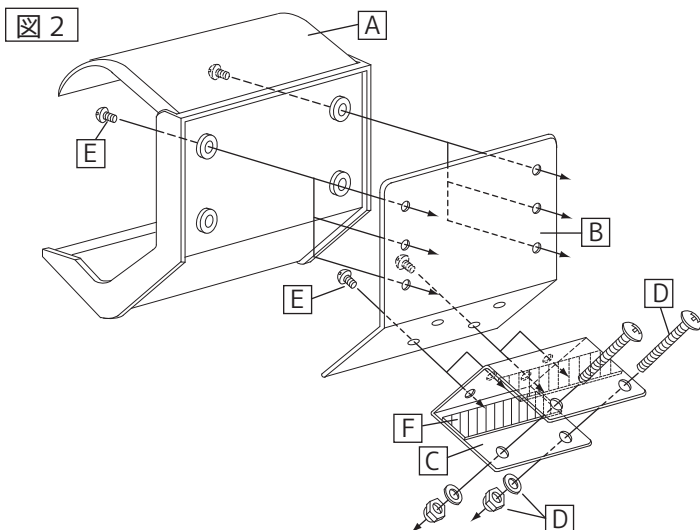
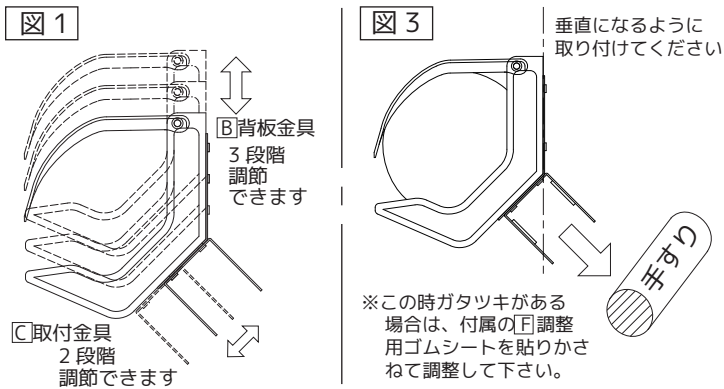
表示	意味
 	は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。
 	は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

		紙巻器以外の用途に使用しない
		手をついたり、寄り掛かったりして体重をかけない 紙巻器が回転し、転倒してケガのおそれがあります。
		跳ね上げタイプの手すりには取り付けない ロールペーパーが落下するおそれがあります。
		分解したり、改造はおこなわない 使用上の不具合の原因になります。
		施工説明書の記載通りに施工する 誤った取り付けをされた場合、手すりが外れたり、ケガをするおそれがあります。
		外れたり、ガタツキがないように強固に取り付ける 取り付け完了後は、ガタツキがないことを確認する 使用される方が転倒し、ケガをするおそれがあります。

②付属部品

	ペーパーホルダー	1 ケ
	背板金具	1 ケ
	取付金具	1 ケ
	固定ボルトセット M6×50 ボルト 2本 ナット 2ケ ワッシャー 2ケ	
	取付ビス (M4×5)	4 ケ
	調整用ゴムシート (25×90) (裏面はシールになっています)	4 枚

③組立手順



- ① 組み立て前に仮の位置決めをして高さを確認してください。この時、高さに合わせて取付穴を選んでください。(図1参照)
- ② 背板金具 B と取付金具 C を取付ビス E を用いて固定します。(図2参照)
- ③ ペーパーホルダー A を②で組み立てた金具組立品に取付ビス E を用いて固定します。(図2参照)
- ④ 左記図3を参照の上、取付金具を手すり本体へはめ込んでください。
※この時ガタツキがある場合は、付属の調整用ゴムシートを上下に貼りかき調整してください。
- ⑤ 固定ボルトセットを図2を参照の上固定してください。

施工後の注意

- ・ガタツキ等ない事を確認してください。
- ・取付ビスがしっかりと締め付けられているか確認してください。

お手入れの仕方

日頃のお手入れは、やわらかい布などで水拭きしてください。汚れがひどい時には、適量に薄めた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取った後、水拭きをしてください。

※トイレ用洗剤、ベンジン、シンナー、強酸性・強アルカリ性薬品およびクレンザー、ナイロンたわしなどは、本体を傷めますので使用しないでください。

●お問い合わせ先

株式会社 シマブン

〒849-0112 佐賀県三養基郡みやき町江口 2488-5

TEL : 0942-89-5235 FAX : 0942-89-5306