

木製ライフサポートバー スタンダードタイプ

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ	
安全上のご注意	2
ご使用上の注意	3
お手入れのしかた	3

●お問い合わせ先



株式会社シマブン

〒849-0112
佐賀県三養基郡みやき町江口 2488-5
TEL/0942-89-5235 FAX/0942-89-5306



安全上のご注意 … 安全のために必ずお守りください





ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しく使用いただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表 示	意 味
	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
	ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

 注意	 禁止	商品が破損したままでの使用はしない 落下・破損部位でケガをするおそれがあります。
	 禁止	強い衝撃を与えたり、硬いものをぶついたりしない 破損し、ケガをするおそれがあります。
	 禁止	火気を近づけたり、ドライヤーの熱を直接あてない 変形・破損し、ケガをするおそれがあります。

●取り扱いの注意

- 手すり以外の用途に使用しないでください。
(ぶら下がる、上に登る、布団を干す等)
- 定期的にガタツキがないか確認してください。
- 万一破損した場合、ケガをするおそれがありますので、さわらずに購入先へ連絡してください。

●ご使用上の注意

- 衝撃を与えないでください。硬いものを落としたり、ぶつけたりすると傷がつきます。
- 強酸性、強アルカリ性の薬品類を付着させないでください。

●お手入れのしかた

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは次のことに注意してください。

- お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、固く絞った布で水拭きしてください。天然木の場合濡れた雑巾使用は、木材表面のいたみの原因になりますので避けてください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭き、その後水拭きしてから、乾いた布で水分をきれいに拭き取ってください。
- 商品を傷めるおそれのあるシンナー、ベンジン等の溶剤及び各種薬品酸性、アルカリ性洗剤等は絶対に使用しないでください。表面のツヤが変わったり、変色するおそれがあります。
- 壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄する場合は、商品に付着しないようご注意ください。※商品を傷めるおそれがあります。